

Kit de Apósito 3M™ V.A.C.® Granufoam™

Apósito para Terapia de Presión Negativa 3M™ V.A.C.®

Kit de apósito compuesto por:

- 1. Espuma V.A.C.® Granufoam™:** Espuma de color negro de éter de poliuretano reticulada con poro abierto de 400 a 600 micrones, hidrofóbica y radiotransparente. Se puede cortar adaptándola a la forma y tamaño de la herida. Proporciona una distribución uniforme de la presión negativa en el sitio de la herida y ayuda a su contracción. Fomenta la formación de tejido de granulación, granula cavidades profundas y proporciona manejo de exudado en heridas muy exudativas.
- 2. Lámina Adhesiva de Terapia 3M™ V.A.C.®:** Transparente, con indicador numérico para facilitar la aplicación. Proporciona una barrera para contaminantes externos y un ambiente húmedo para la curación. Tiene adhesivo de acrilato, semipermeable, se puede cortar y es fácil de manipular.
- 3. Sensor 3M™ SensaT.R.A.C.™:** Es un sistema multilumen con conector y sensores que permite la eliminación eficaz del exudado de la herida o úlcera a través de una tubuladura (cilíndrica) de silicona flexible de 90 cm. Con sistema de bloqueo tipo clamp y conexión tipo Luer-Lock, además de un disco de silicona con film transparente con adhesivo de un diámetro total de 10 cm. Tiene un orificio central que debe conectarse completamente con la espuma V.A.C.® Granufoam™ para realizar el proceso de aspiración. Este sistema cuenta con una tecnología de sensores externos de luz que permiten controlar y ajustar la presión del sitio de la herida, garantizando el nivel de presión seleccionada. Ayuda a reducir los bloqueos de conexión e indica las alarmas. Tiene incorporada tecnología 3M™ Easyclear Purge™ que ayuda a limpiar el exudado en el lumen interno, detecta obstrucciones y activa una ráfaga de aire positiva a través de los lúmenes externos aproximadamente cada 5 minutos para ayudar a reducir los bloqueos.
- 4. Regla 3M™ V.A.C.®:** regla desechable de 19,5 cm con etiquetas adhesivas para registro y un cuadro para identificación de medidas de imágenes fotográfica.

¿Cuándo se utiliza?

Este insumo se utiliza en heridas o úlceras que requieren la Terapia de Presión Negativa V.A.C.®, tales como:

- Heridas crónicas y agudas.
- Heridas traumáticas, subagudas, dehiscentes.
- Quemaduras de espesor parcial.
- Colgajos e injertos.
- Úlceras (pie diabético, LPP, Venosas).

¿Cuándo se cambia?

Cada 48 a 72 hrs. o antes, en caso de considerarse necesario.



Precauciones

- Para la instalación de la Terapia de Presión Negativa 3M™ V.A.C.® y eliminación de apósitos e insumos, siga los protocolos institucionales (REAS).
- No coloque los apósitos de espuma del Sistema de Terapia 3M™ V.A.C.® directamente sobre vasos sanguíneos, zonas de anastomosis, órganos o nervios expuestos.
- Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito.
- Proteja la piel perilesional con 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor (PPSA) antes de adherir las láminas adhesivas.
- No corte las espumas sobre la herida o úlcera del paciente, evite que caigan residuos de la misma.

Contraindicaciones

- Osteomielitis no tratada.
- Fístulas no entéricas e inexploradas.
- Tejido necrótico con escara.
- Neoplasia maligna en la herida.
- Hemorragias

Certificados

- Libre venta (CFG) otorgado por FDA
- ISO 13485-2016 emitido por BSI
- Carta 3M certificación Non Látex
- Carta 3M certificación Esterilidad

Código de Referencia	Tamaño	Contenido	Presentación
M8275051/10	S	1 Espuma de poliuretano V.A.C.® Granufoam™: 10 x 7,5 x 3,2 cm 1 Lámina Adhesiva V.A.C.®: 31,8 x 26 cm 1 Sensor SensaT.R.A.C. 1 Regla desechable V.A.C.®	Unidad / Caja de 10 unidades
M8275052/10	M	1 Espuma de poliuretano V.A.C.® Granufoam™: 18 x 12,5 x 3,2 cm 2 Láminas Adhesivas V.A.C.®: 31,8 x 26 cm 1 Sensor SensaT.R.A.C. 1 Regla desechable V.A.C.®	Unidad / Caja de 10 unidades
M8275053/10	L	1 Espuma de poliuretano V.A.C.® Granufoam™: 26 x 15 x 3,2 cm 2 Láminas Adhesivas V.A.C.®: 31,8 x 26 cm 1 Sensor SensaT.R.A.C. 1 Regla desechable V.A.C.®	Unidad / Caja de 10 unidades
M8275065/5	XL	1 Espuma de poliuretano V.A.C.® Granufoam™: 60 x 30 x 1,8 cm 5 Láminas Adhesivas V.A.C.®: 31,8 x 26 cm 1 Sensor SensaT.R.A.C. 1 Regla desechable V.A.C.®	Unidad / Caja de 5 unidades



SUIZO ARGENTINA

Av. Monroe 801
Núñez C1428BKC
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 7700 0255 Int: 2001



Los insumos de la Terapia de Presión Negativa V.A.C.® no están hechos con látex de caucho natural.

Todos los insumos V.A.C.® son sometidos a proceso de esterilización por radiación gamma, con símbolo internacionalmente reconocido impreso en cada unidad.

Para mayor información, contáctese con su representante de ventas 3M local.

3M y las demás marcas que se muestran son marcas y/o marcas registradas. Por favor recicle.
© 3M 2022. Todos los derechos reservados.